



DES DEFIBRILLATEURS AU CAS OU...

Comme nous l'avons déjà indiqué, la commune s'est dotée, grâce à l'aide précieuse du Sénateur FRECON et du Conseil Général de la Loire de 3 défibrillateurs.

Nous espérons que la population appréciera cette acquisition tout en souhaitant ne pas y avoir recours.

Nous vous transmettons ci-dessous les consignes d'utilisation complétées au dos par le schéma de l'appareil.

CONSIGNES CONCERNANT LES DEFIBRILLATEURS

Le défibrillateur **HeartStart M5066A** est conçu pour un emploi facile et fiable. Il est utilisé pour traiter un patient victime d'un **A.C.S.** (Accident Cardiaque Soudain)

Les signes d'arrêt cardiaque soudain sont :

- Perte de connaissance et absence de réponse lorsque la personne est secouée ;
- Respiration anormale

EMPLACEMENT

Vous trouverez les défibrillateurs :

- 1 sur **la façade de la mairie**, côté parking de la poste
- 2 sur **la façade, près de l'entrée de la salle de sports** ERA
- 3 sur **la façade des vestiaires du foot** de septembre à juin, puis **à la piscine** en juillet et août.

Avant toute intervention, appeler ou faire appeler le 15 ou le 18 ou le 112.

UTILISATION

Après avoir sorti l'appareil de sa protection murale en brisant la vitre à l'aide du petit marteau.


Tirer la poignée verte vers le haut et suivre les indications vocales

Le maire et son conseil municipal vous invitent
à une réunion d'information le
16 octobre 2009 à 20 heures
à la salle ERA

Au nom de toute l'équipe municipale.
LE MAIRE,
Pascal PONCET.

Vérifiez les signes d'arrêt cardiaque soudain : perte de conscience
 respiration anormale

1. TIREZ

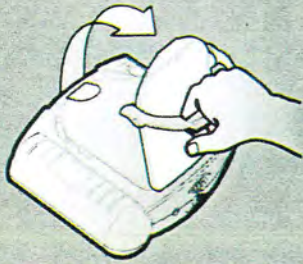


2. PLACEZ



3. APPUYEZ



AIDE-MÉMOIRE

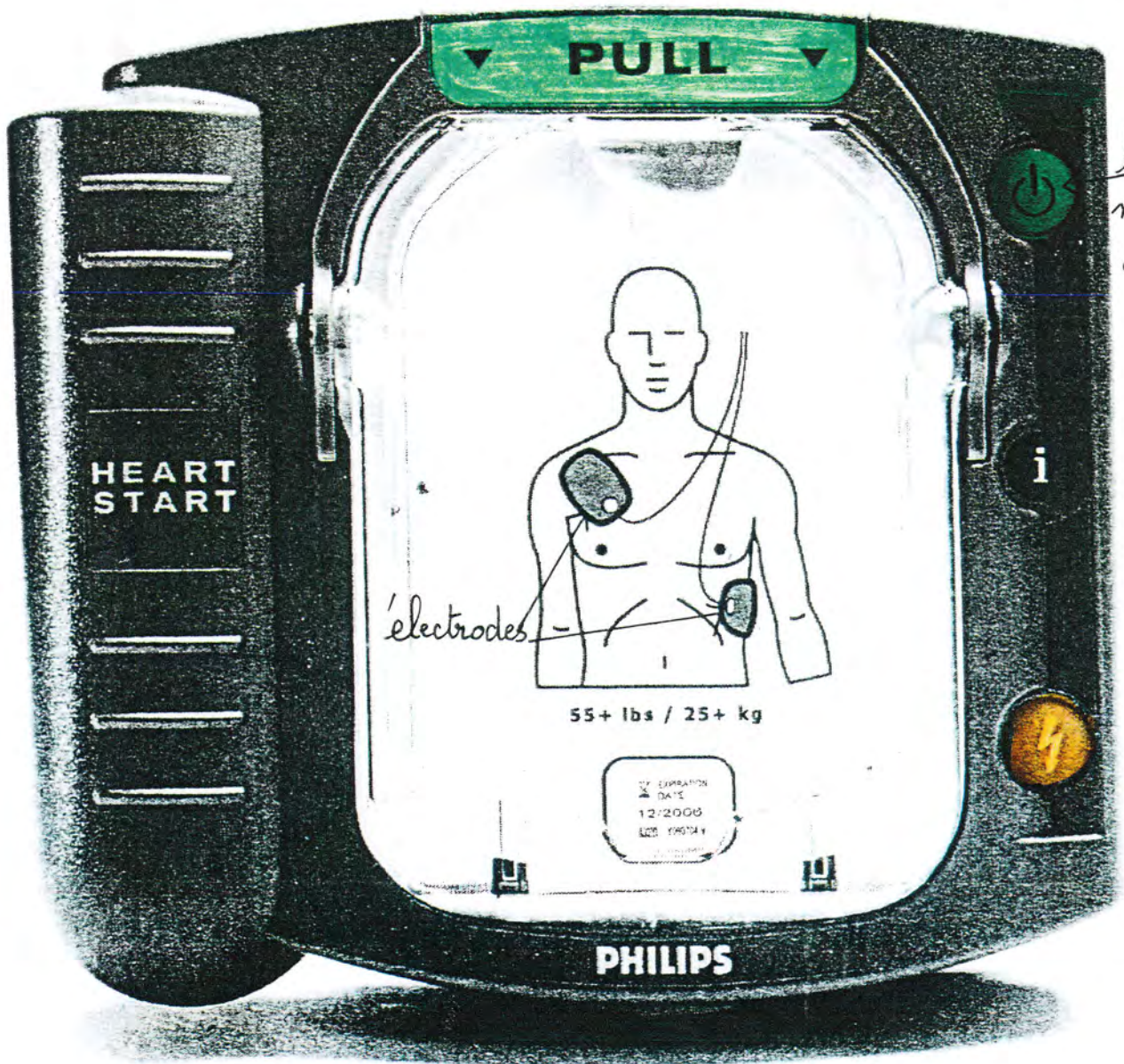

*bouton
marche
arrêt*

électrodes

HEART
START

55+ lbs / 25+ kg

PHILIPS

EXPIRATION
DATE
12/2006
ECC 198744